



CREADO POR SDI

POLA

SISTEMA AVANZADO DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL

SU
CATÁLOGO
DE SONRISAS





PERSONALICE UN
TRATAMIENTO DE
BLANQUEAMIENTO
ADECUADO A LAS
NECESIDADES DE
SU PACIENTE

POLA OFFIC

POLA E+

OFFIC

E



Pola Office+ contiene una fórmula única que activa inmediatamente el tratamiento de blanqueamiento.

Mediante la acción de descomposición de los iones de peróxido, el proceso de blanqueamiento Pola se activa. El uso de la luz no es necesario, pero recomendable para acelerar el proceso.

Pola Office+ El blanqueamiento más rápido del mundo, blanquea los dientes con seguridad en treinta minutos con un pH neutro que protege las encías y los dientes de sus pacientes.

indicaciones: Blanqueamiento de dientes descolorados vitales y no vitales.

Reducir al máximo el tiempo pasado en el sillón dental

Una fórmula única de peróxido de hidrógeno al 37,5 %, diseñada para blanquear los dientes en tan solo 30 minutos.

Requiere una capa fina aplicada sobre el diente que se retira fácilmente usando el aspirador del sillón.

Desensibilizante integrado

Pola Office+ se ha diseñado para proteger los nervios dentales y terminaciones nerviosas sensibles con la Tecnología Desensibilizante Pola (TDP).

Pola Office+, con pH neutro y TDP, garantiza que el blanqueamiento solo actúa en los dientes, reduciendo al mínimo la irritación, la sensación de ardor, el dolor o los daños a las encías a largo plazo.

POLAOFFICE+ GUÍA PASO A PASO EN CONSULTA



1. Determine y registre el tono preoperativo empleando la guía de tonos de Pola proporcionada en el envase.
2. Limpie los dientes SOLO con piedra pómez a base de flúor. Realice una profilaxis.
3. Coloque el retractor labial y a continuación proteja los tejidos blandos expuestos con vaselina.
4. Seque los dientes y aplique la barrera gingival en ambas arcadas, cubriendo ligeramente el esmalte y los espacios interproximales.
5. Polimerice la barrera gingival hasta que endurezca (10-20 segundos).
6. Manteniendo una distancia de seguridad con el paciente, coloque la boquilla mezcladora a la jeringa del Pola Office+. Dispense una pequeña cantidad de gel en un bloc de mezclas hasta conseguir un gel uniforme.
7. Utilizando la boquilla como guía, aplique directamente una capa fina de gel a todos los dientes que se someterán al tratamiento. NOTA: Es mejor no levantar la boquilla al desplazarse entre dientes. Haga movimientos continuos.
8. Deje el gel actuar por un período de 8 minutos.
9. Retírelo con succión, usando una punta aspiradora. Nota: Es normal que quede una capa residual de gel en la superficie de los dientes.
10. Repita tres veces los pasos 7 a 9 (de manera opcional 4 veces). Tras la última aplicación, succione y enjuague todo el gel para retirarlo por completo.
11. Registre el tono final .

Nota: Pola Office+ solo puede ser aplicado por dentistas.
Visite www.polawhite.com.au para obtener más información.

POLA
DAY

POLA
NIGHT

PARA APLICAR EN CASA

Liberación de flúor

Tanto Pola Day como Pola Night contienen flúor, el cual ayuda a fortalecer el diente para protegerlo contra la sensibilidad.

Seguro y cómodo

Pola Day y Pola Night cuya formulación tiene un alto contenido en agua y pH neutro, protege las encías y los dientes durante el tratamiento.

Blanqueamiento eficaz

El efecto blanqueador deseado puede lograrse en tan solo 30 minutos o puede aplicarse cómodamente durante la noche mientras duerme.

Hay una gran variedad de concentraciones de Pola Day y Pola Night que los pacientes pueden utilizar de forma domiciliaria. Utilice el selector de pola para elegir el producto más apropiado para su paciente (visite www.polawhite.com.au).

Tecnología Desensibilizante Pola (TDP)

Pola Day y Pola Night contiene TDP que contribuye a la prevención de la sensibilidad postoperatoria.

¿Cuál es la diferencia entre Pola Day y Pola Night?

Pola Day consiste en una amplia gama de gel a base de peróxido de hidrógeno de aplicación domiciliaria específicamente diseñados para lograr resultados de

blanqueamiento en pacientes que dispongan de poco tiempo.

Pola Night es una gama de gel a base de peróxido de carbamida de aplicación domiciliaria que proporcionan resultados de blanqueamiento óptimos en pacientes que tengan dientes más sensibles.

Ambas gamas están disponibles en una variedad de diferentes concentraciones, que se adapta a cada historial de sensibilidad del paciente.



GUÍA PASO A PASO PARA APLICACIÓN DOMICILIARIA

1. Aplique una pequeña gota de gel en cada compartimiento de la férula para los dientes que se someterán al tratamiento.
2. Coloque la férula conteniendo el gel alrededor de sus dientes.
3. Limpie cualquier exceso de gel de la boca con un pañuelo desechable o un cepillo dental suave y seco.
4. Después del tratamiento, retire la férula. Enjuague la férula y la boca con agua tibia.
5. Cepille los dientes.



POLA LIGHT

UN NUEVO SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL DE APLICACIÓN DOMICILIARIO CON TECNOLOGÍA LED

DISFRUTE DE UNA SONRISA MÁS BLANCA Y RADIANTE EN TAN SOLO 5 DÍAS.

Pola Light es un sistema avanzado de blanqueamiento dental que combina la fórmula del blanqueamiento Pola, sistema premiado por la industria, con una férula LED, para un tratamiento de blanqueamiento más rápido.

- El sistema Pola Light se combina con el gel Pola Day.
- De rápida acción, se consiguen dientes más blancos en tan solo 5 días.
- Formulado para eliminar con seguridad las manchas más duraderas.
- Recargable para tratamientos ulteriores.
- Remineralización para fortalecer los dientes.
- Hidratación adicional para minimizar la sensibilidad.



A PARTIR DE
TAN SOLO 20
MINUTOS AL DÍA

Tratamientos de 2 x10 o 2 x
15 minutos al día.



FÁCIL DE USAR

Portátil, recargable y fácil de utilizar sin cables unidos a la férula.

La férula LED de Pola está formada por un doble arco de tamaño universal.



DIENTES MÁS
BLANCOS EN
CINCO DÍAS

Tratamiento de 5 días.
Sin necesidad de pasar por el sillón dental ni de férulas personalizadas, ahorrando tiempo tanto para el paciente como para el dentista.



PUSADO Y
RECOMENDADO POR
PROFESIONALES

Pola es un sistema profesional de blanqueamiento dental en el que confían los dentistas, lo recomiendan para lograr una sonrisa más blanca, de forma más rápida y segura.

Los gels de blanqueamiento dental con alta viscosidad y pH neutro garantizan la mayor comodidad del paciente, en un kit de uso domiciliario.

La mezcla única de calmantes, acondicionadores y alto contenido en agua permite reducir la sensibilidad.

FAQ

REGUNTAS FR ECUENTE S

¿que provoca la descoloración dental?

Los dientes de cada persona son únicos, por tanto, se descolorean y manchan de distintas maneras. La descoloración o las manchas de los dientes de una persona están provocadas habitualmente por el café, el té negro, las infusiones, el vino tinto, las comidas picantes, como por ejemplo el curry, y el tabaco.

¿Cómo funciona el blanqueamiento dental?

Cuando se aplica un producto blanqueador al diente se descompone en agua e iones de oxígeno. Los iones de oxígeno penetran en el esmalte y atacan las moléculas largas de las manchas para romperlas eficientemente y hacerlas más cortas e incoloras. Dichas moléculas cortas e incoloras son retiradas del diente de manera natural gracias a la saliva. La intensidad del blanqueamiento está asociada al número de iones disponibles y el tiempo que hayan estado en el diente.



¿Cuánto se tarda en blanquear los dientes de un paciente?

Con un blanqueamiento en consulta, los resultados se obtienen en tan solo 30 minutos de tratamiento. Mediante un sistema de blanqueamiento en casa, puede tomar aproximadamente de 5 a 14 días.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de blanqueamiento?

Depende de cada persona y sus hábitos bucodentales. El blanqueamiento debe repetirse cada 6 a 12 meses, tanto para tratamientos en consulta como en casa. Sin un retoque, los dientes de sus pacientes volverán a mancharse por el mismo motivo que provocó que se descoloren inicialmente.

¿Qué sucede si el paciente tiene restauraciones o carillas, cambiará el color de estas?

El blanqueamiento eliminará cualquier mancha existente en la restauración pero no tendrá efecto en el tono original.

¿Existe algún efecto secundario?

Siguiendo las instrucciones de uso incluidas con los productos Pola, en la mayoría de los casos no tendrá efectos secundarios. Sin embargo, puede experimentarse una sensibilidad temporal (dolor sordo o agudo, sensibilidad al calor o al frío). Esto disminuirá unas horas después del final del tratamiento y no dejará ningún problema residual. El tiempo de utilización puede acortarse o reducir su frecuencia o los dientes pueden ser tratados con un desensibilizante, Soothe. El paciente deberá abstenerse de tomar bebidas gaseosas, cítricos y bebidas cítricas para evitar la sensibilidad.

¿Es seguro el blanqueamiento dental durante el embarazo?

No se recomienda el uso de productos de blanqueamiento durante el embarazo.

CASOS CLÍNICOS



Dr. Marta Peydro Herrero
Dr. José Amengual Lorenzo

POLA
POLA OFFICE
+
NIGHT

Pola Office+ 37.5% seguido de
5 semanas de Pola Night 16%

Los productos blanqueadores que conforman el sistema de blanqueamiento dental Pola me permiten resolver la mayoría de las descoloraciones dentales que podemos encontrar en la práctica clínica diaria de manera sencilla, pero, sobre todo, de una manera segura para el paciente. Ya sea en un tratamiento en consulta, en casa o combinado, logramos una sonrisa blanca, cumpliendo las expectativas de nuestros pacientes.



Prof. Leandro Martins

POLA NIGHT

Pola Night 10%

Uno de los mayores problemas del blanqueamiento dental es la sensibilidad dental. En consecuencia, encontrar productos que aporten mayor seguridad es la clave. Con una baja concentración de peróxido de carbamida, el blanqueamiento Pola Night tiene un mayor contenido de agua, pH neutro, desensibilizantes y alta viscosidad. Estas características responden a la demanda de los pacientes de un resultado eficiente, pero con protección contra la sensibilidad y la irritación gingival. Por tanto, la elección de Pola Night 10 % se debe a sus características como un producto cómodo, seguro y eficiente.



Dr. Michael Chan

POLA OFFICE+

Pola Office+ 37.5%

La familia de productos de blanqueamiento Pola ofrece una gran flexibilidad a los pacientes. Los productos Pola Office+ en consulta tienen una buena coherencia que permite un mayor control clínico. El sistema me ha parecido fácil de usar y con una hipersensibilidad mínima para los pacientes.



Dr. David Carralero Plaza

POLA DAY

Pola Day 6%

Pola Day es un producto que he usado durante más de 10 años, con muy buenos resultados. Para los tratamientos en casa, prefiero utilizar la máxima concentración de peróxido de hidrógeno, porque obtenemos resultados más rápidos y cómodos para nuestros pacientes, ya que el producto puede tenerse en la boca durante menos tiempo.

